

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ECÓGRAFOS



LIMPIEZA DEL ECÓGRAFO

1. Apague y desconecte el sistema de ultrasonido de la toma de corriente para limpiar la superficie del sistema.
2. Use un paño suave sin pelusas para limpiar las superficies de la pantalla del monitor, la pantalla táctil, el panel de control, el teclado.
3. Retire el gel de ultrasonido de la superficie de la sonda después de cada examen.
4. Limpie la pantalla del monitor con un limpiador para monitores, **EVITE** el uso de **ALCOHOL**, puede dañarlo.

Consulte el manual de usuario del ecógrafo para conocer los estándares de desinfección específicos.

Servicio urgente, contacte 91748 06 06

stecnico@sakurakonika.com

Link del listado de virucidas autorizados en España

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ECÓGRAFOS



DESINFECCIÓN DEL ECÓGRAFO

1. Evite el uso de **ALCOHOL** para desinfectar la superficie de la sonda y los cables de la sonda.
2. Use desinfectantes de tipo **amonio cuaternario o peróxido de hidrógeno**, para desinfectar la sonda después de cada examen. Aplicar a la sonda, cable de la sonda, pantalla del monitor, pantalla táctil.
3. Limpiar la sonda antes de desinfectar y desinfectar la sonda endocavitaria antes y después de cada uso.
4. Proteja los enchufes y los cables de la sonda antes de la desinfección para evitar daños en la sonda.



Los compuesto de **amonio cuaternario** se fijan a la superficie de los microorganismos, ejerciendo su acción biocida, inhibiendo las funciones de la pared celular y de la membrana citoplasmática. Estos compuestos presentan actividad bactericida, fungicida y **virucida**. El **peróxido de hidrógeno** es capaz de destruir un amplio espectro de microorganismos, bacterias, **virus...**